

Hvornår hjælper Leukotape K? Gode resultater ved mange lidelser

Den elastiske tape gør det muligt at behandle en lang række lidelser med forbløffende resultat. Metoden, som oprindeligt stammer fra Japan, har stedse været genstand for videreudvikling og forskning.

Ikke blot lidelser i bevægelsesapparatet lader sig behandle med Leukotape K Også hovedpine hører i dag blandt de vigtigste indsatsområder.

Også patienter med kroniske smerter; f.eks. patienter med kroniske led- eller rygsmerter, kan drage fordel af den nye behandlingsform. Hos disse patienter, hvor det ofte ikke er muligt at finde årsagen til smerten, har smerten selvstændiggjort sig og er således blevet en sygdom i sig selv. Patienter med kroniske smerter oplever i mange tilfælde en god virkning med Leukotape K.

Et yderligere indsatsområde for Leukotape K er lymfødemer i arme og ben, hvor vedvarende massage gennem Leukotape K kan fremme lymfecirkulationen.



Leukotape K kan genoprette bevægelighed og velbefindende hos mange smertepatienter.

Leukotape K Pain Relief Technique Komfortabelt og patientvenlig

- © Robust og hudvenligt materiale af bomuld
- © Hudvenlig klæbemasse af polyacryl med god klæbeevne
- © Let at fjerne
- © Tilpasser sig hudens elastiske egenskaber på optimal vis
- © Høj komfort døgnet rundt
- © Lang holdbarhed på op til en uge
- © Sport, sauna og brusebad er intet problem
- © Naturligt virkeprincip helt uden bivirkninger.

Leukotape fås i 3 attraktive farver:



Leukotape K Pain Relief Technique Lille plaster med stor virkning

Leukotape K med Pain Relief Technique er en elastisk tape, som tapes direkte på huden i det smerteramte område. Ofte virker tapen allerede efter få minutter, og smerten stilner af.

Smerten reduceres ved at aktivere huden

Med Pain Relief Technique (PRT) kan smertelindring nås ad to veje. Ved den første metode påvirkes kroppens smertefølerne, de såkaldte nociceptorer, som registrerer forstyrrelser i kroppen, eksempelvis muskelspændinger. Receptorerne opfanger smertesignalet og sender det videre til hjernen, hvor den egentlige følelse af smerte opstår. Leukotape K afbryder imidlertid dette smertesignal til hjernen, og smerten enten forsvinder eller stilner af.

Det anden metode fjerner forstyrrelserne i blodforsyningen i det beskadigede væv. Ved bevægelser i løbet af dagen løfter huden i det tapede område sig i små bølgeformer. Resultat: De sammenpressede blod- og lymfekar bliver igen frie, kroppens egen pumpeydelse stiger, blodcirkulationen fremmes, og helingsprocessen speedes op.

Hvad kan Leukotape K gøre for jeres patienter?

Mange smertetilstande kan behandles med Leukotape K med godt resultat:

- Tennisalbue
- Achillessene
- Halshvirvelsøjle
- Lændehvirvelsøjle
- Frossen skulder
- Lymfødemer
- Migræne

KINESIOTAPE

NYHED



BSNmedical

Sport Medical Products[®]
aserve[®]
www.a-serve.dk
Industrivej 6 • 7430 Ikast • Tlf. 87 242 111
Fax 87 242 113 • salgskontoret@a-serve.dk

Bskreativ.dk • 70 225 255

Sport Medical Products[®]
aserve[®]
www.a-serve.dk
Industrivej 6 • 7430 Ikast • Tlf. 87 242 111
Fax 87 242 113 • salgskontoret@a-serve.dk

BSNmedical

Pain Relief Technique - en ny, opsigtsvækkende behandlingsmetode

Ny, sensationel viden om anvendelse af elastiske tapeprodukter som f.eks. Leukotape K gør det nu muligt at hjælpe en lang række smertepatienter. Topen klæbes på huden i det smerteramte område, og smerten stilner af - ofte i løbet af få minutter.

En lang række smertetilstande reagerer positivt på behandling med Leukotape K, herunder:

Rygsmarter, nakkesmerter, tennisarm, hovedpine, øm akillessene - for blot at nævne et par eksempler. Selv ved kroniske smerter, som er svære at handle, opnås ofte gode resultater ved behandling med den nye tape. Efter mange år med lidelse og talrige behandlingsforsøg oplever mange patienter for første gang igen at være fri for smerte.

Det LYDER forbløffende – og det ER forbløffende. Forbløffende effektivt og forbløffende enkelt.

Vi formoder, at du gerne vil høre mere om dette fascinerende behandlingsprincip og har derfor på de følgende sider beskrevet, dels hvordan Leukotape K virker, dels hvordan den anvendes. Har du yderligere spørgsmål, kan du enten spørge din læge eller behandler.




Ny indikation

Frossen skulder



Ny indikation

Skinnebnsproblemer

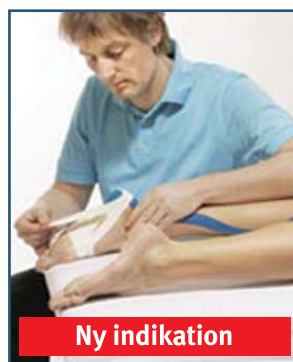

Ny indikation

Krampe i læggen



Rygsmarter



Tennisarm



Hovedpine



Akillessene

Sportstape/BSN Kinesiotape

Varenr.	Dimension	Tekst	Vejl. Udsalg pr. stk.
2070	2,5 cm x 5 m	BSN Leukotape K blå til Kinesiotapening	kr. 100,00
2071	2,5 cm x 5 m	BSN Leukotape K hudfarvet til Kinesiotapening	kr. 100,00
2072	2,5 cm x 5 m	BSN Leukotape K rød til Kinesiotapening	kr. 100,00
2073	5 cm x 5 m	BSN Leukotape K blå til Kinesiotapening	kr. 190,00
2074	5 cm x 5 m	BSN Leukotape K hudfarvet til Kinesiotapening	kr. 190,00
2075	5 cm x 5 m	BSN Leukotape K rød til Kinesiotapening	kr. 190,00

Hvordan virker Leukotape K? Smertelindring ved hjælp af forstyrrende signaler

Smerter er et signal om, at der er noget galt i kroppen. Således kan ikke blot læsioner men også betændelser udløse smerte. Smerter i bevægelsesapparatet, f.eks. kroniske rygsmarter, skyldes ofte muskelspændinger.

Følelsen af smerte opstår altid på samme måde:

Næsten overalt i kroppen findes smertefølere; de såkaldte nociceptorer. Nociceptorer er bittesmå nerveceptorer, der registrerer forstyrrelser i kroppen – f.eks. muskelspændinger. Nociceptorerne opfanger smertesignalet og sender det videre til hjernen, hvor den egentlige følelse af smerte opstår.

Og det er præcis denne videresendelse af smertesignalet til hjernen, som Leukotape K, på både raffineret og enkel vis, kan gå ind og afbryde. Den elastiske tape frembringer en slags vedvarende massage af huden, og da nociceptorerne reagerer på mekaniske påvirkninger, opstår der gennem den vedvarende massage en kontinuerlig sansepåvirkning.

Forskere formoder, at smertesignalerne på denne måde "overdøves", og således ikke længere når frem til hjernen. Resultatet er, at smerten enten forsvinder eller hurtigt stilner af.


Uden Leukotape K

Huden "trykker" på smertereceptorerne



Med Leukotape K

Leukotape K tapes på huden "i bølgeform", hvorved der udløses en masseeffekt ved hver bevægelse

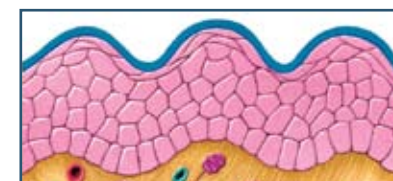

Hvordan virker Leukotape K? Smertelindring ved hjælp af drænage

En hurtig smertelindring er en forudsætning for dit velbefindende. Derfor må det til syvende og sidst dreje sig om at fjerne årsagen til smerten og sætte skub i helingsprocessen, også her kan Leukotape K hjælpe.

En god blodforsyning i det beskadigede væv er vigtig. De mindste blodkar, kapillærene, har til opgave dels at tilføre næringsstoffer dels at borttransportere giftstoffer.

Det springende punkt er imidlertid følgende: I et beskadiget væv er blodforsyningen forstyrret. Beskadiget væv svulmer op, hvorved kapillærer og lymfekar trykkes sammen. Tilførsel af næringsstoffer og borttransport af giftstoffer kan derfor ikke fungere optimalt, og der opstår væskeophobninger.

Leukotape gør det muligt at fjerne disse væskeophobninger. Når du bevæger dig, løfter huden i det tapede område sig i små bølgeformer, og de sammenpressede kapillærer og lymfekar i de underliggende lag bliver igen frie. Den rytmiske bevægelse i det tapede hudområde understøtter kroppens egen pumpeydelse, blodcirkulationen fremmes, og helbredelsesprocessen fremskyndes.

Uden Leukotape K

Blod- og lymfekar er trykket sammen, forsyningen til vævet er forstyrret eller helt afbrudt.



Med Leukotape K

Takket være masseeffekten udvides blod- og lymfe kar, borttransport af giftstoffer og tilførsel af nærings stoffer forbedres.

